

# Procedimento Operacional Padrão (POP)



## POP 36 – TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS

<b>1 – FINALIDADE:</b>  Detectar de forma qualitativa o anticorpo contra antígenos do <i>Treponema pallidum</i> .	<b>Data elaboração:</b>  Outubro/ 2022
<b>2 – INDICAÇÃO/ CONTRAINDICAÇÃO:</b>  ✓ <b>Indicação:</b> homens e mulheres que procurem a unidade de saúde com necessidade de conhecimento de status sorológico, indivíduos com exposição de risco e/ou gestantes;  ✓ <b>Contraindicação:</b> não se aplica.	
<b>3 – RESPONSABILIDADE:</b>  Enfermeiro ou profissional de nível superior com capacitação.	
<b>5 – MATERIAL:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• kit de Teste Rápido de Sífilis</li><li>• Diluente (solução Tampão)</li><li>• Alças coletoras descartáveis (pipeta)</li><li>• Lancetas descartáveis</li><li>• Álcool 70 %</li><li>• Algodão</li><li>• Luvas de procedimento</li><li>• Cronômetro ou relógio</li><li>• Recipiente para descarte para material biológico potencialmente infectante</li><li>• Caneta com tinta permanente para escrever</li><li>• Impresso para emissão do Laudo</li><li>• FOLHA DE TRABALHO com nome do testador, data, marca do teste, lote e validade.</li></ul>	
<b>6 – DESCRIÇÃO DA TÉCNICA:</b>	
<b>Ação</b>	<b>Justificativa</b>
01. Acolher o paciente, explicando o propósito do exame e as etapas do procedimento;  02. Realizar a entrevista padronizada, individualmente com apresentação de documento oficial com foto. E encaminhar para coleta individual.	01 e 02. Proporcionar um acolhimento com escuta qualificada, atendimento ético e humanizado;

## Procedimento Operacional Padrão (POP)

03. Higienizar as mãos;

04. Retire o suporte de teste do envelope laminado, identifique-o com o nome/número de identificação do indivíduo;

05. Verificar a integridade de todos os componentes do teste de acordo com as orientações do fabricante (bula) (Figura 1).

*Figura 1. Kit Teste rápido Sífilis*



Fonte: SMS Batatais, 2022.

06. Vestir as luvas de procedimento;

07. Coletar da amostra por punção digital (sangue total).

08. Perfurar a extremidade do dedo com a lanceta fornecida no kit.

## Procedimento Operacional Padrão (POP)

09. Encostar a pipeta na gota de sangue a ser testado, recolhendo o sangue de acordo com as orientações de cada bula específica de cada teste.

10. Depositar a amostra de sangue coletado pela pipeta no poço do dispositivo do teste de acordo com as instruções da bula (Figura 2).

11. Adicionar as gotas da solução necessárias ao poço de acordo com as instruções da bula, mantendo o frasco na posição vertical (Figura 2).

*Figura 2. Dispositivo de teste*



Fonte: Telelab, 2022.

12. Registrar o horário através do relógio marcando no dispositivo do teste após adicionar a solução tampão.

13. Aguardar o aparecimento da(s) linha(s) colorida(s). Interpretar o resultado. Seguir o tempo necessário para a leitura do resultado segundo as instruções da bula, não devendo realizar a leitura depois de transcorrido esse tempo.

14. Desprezar a lanceta em recipiente para perfurocortante;

## Procedimento Operacional Padrão (POP)



15. Desprezar o dispositivo do teste e a pipeta em lixo para descarte de material biológico potencialmente contaminado;

16. Retirar e descartar as luvas de procedimento;

17. Aconselhar o indivíduo quanto às infecções IST, tratamento, janela imunológica, prevenção e sobre os testes rápidos.

18. Interpretar o resultado obtido pelo teste e informar o paciente, mostrando o dispositivo do teste reagente para que seja feita a conferência junto o mesmo;

19. Preencher o laudo do teste rápido, assinar e entregar para o paciente;

20. Se o resultado obtido for reagente, solicitar titulação por meio do exame VDRL;

21. Se houver titulação, iniciar tratamento com prescrição médica.

20. Necessária titulação para descartar cicatriz sorológica.

### 7 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O TESTE:

#### ➤ Interpretação de resultados (Figura ):

- **NÃO REAGENTE:** apenas uma linha colorida é formada na região da linha controle (C). Nenhuma linha é formada na região teste (T);



Fonte: Telelab, 2022.

- **REAGENTE:** duas linhas coloridas são formadas na janela de resultado. Uma linha colorida é formada na região da linha controle (C) e outra linha colorida é formada na região da linha teste (T);


## Procedimento Operacional Padrão (POP)



Figura 1 – Interpretação de resultado reagente para Sífilis no kit Sífilis Bio-Bioclin.

Fonte: Telelab, 2022.

- **INVÁLIDO:** a linha controle (C) não é formada. Os resultados de qualquer teste que não tenha produzido a linha controle (C) no momento de leitura especificado devem ser descartados. Volume insuficiente de amostra, problemas na migração da amostra ou técnicas de procedimento incorretas são as razões mais prováveis de falha na linha controle (C).

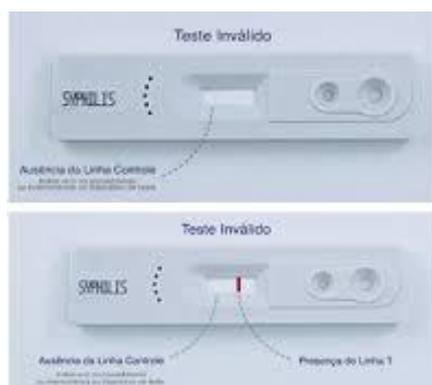

Figuras 3 – Testes Inválidos.

Fonte: Telelab, 2022.

### 8 – OBSERVAÇÕES:

- **CONSULTE SEMPRE A BULA DO TESTE DISPONIBILIZADO**, pois algumas orientações podem variar de um laboratório para outro\*;
- **SEMPRE OFERTAR PARA GESTANTES**, visando à diminuição da transmissão vertical;
- Fornecer o resultado acompanhado do laudo, mediante apresentação de documento com foto;
- Laudo sempre assinado e carimbado pelo testador;
- Orientar a necessidade do parceiro (a) realizar o teste rápido para sífilis;
- Notificar o caso no SINAN caso resultado reagente.

**Procedimento Operacional Padrão  
(POP)**



**8 – REFERÊNCIAS:**

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual Técnico do diagnóstico da sífilis: TELELAB**. Brasília: 2019, 10p. Disponível em: [https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/207775/mod\\_resource/content/1/Manual%20TR%20SI%CC%81FILIS%20BIO%20E2%80%93%20BIOCLIN%20282019%29.pdf](https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/207775/mod_resource/content/1/Manual%20TR%20SI%CC%81FILIS%20BIO%20E2%80%93%20BIOCLIN%20282019%29.pdf). Acesso em: 19 Out 2022.

<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Carolina de Castro Castrighini COREn/SP: 330.502	Maristela de Sousa COREn/SP: 418.985	Bruna Francielle Toneti COREn/ SP: 496.577